



## MEENERGY™ CROS iRIC AX

Manual del operador

[www.miracle-ear.com](http://www.miracle-ear.com)

Made for

 iPhone | iPad | iPod

# Contenidos

<b>Bienvenido</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Su transmisor CROS</b>	<b>5</b>
<hr/>	
Componentes y nombres	7
Controles	8
Programas de audición	8
Tonos de aviso	8
<b>Uso diario</b>	<b>9</b>
<hr/>	
Colocación y extracción del transmisor	9
Conexión y desconexión	12
Cambio al modo de reposo	13
Cambio del programa de audición	14
Bluetooth	14
Carga	15
<b>Mantenimiento y cuidados</b>	<b>16</b>
<hr/>	
Transmisor	16
Moldes	18
Mantenimiento profesional	20
<b>Información adicional</b>	<b>21</b>
<hr/>	
Accesorios	21
Explicación de los símbolos	21
Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento	23
Información sobre la eliminación	24
Solución de problemas	25
Información de conformidad	26
Información específica por país	28

<b>Información importante de seguridad</b>	<b>29</b>
Pila recargable de iones de litio (batería)	29
Seguridad personal	31
Seguridad del producto	34
Servicio y garantía	36

# Bienvenido

Gracias por elegir nuestros accesorios para audífonos.

Con este manual y con la ayuda su especialista en audición descubrirá las ventajas y la mejora en la calidad de vida que le ofrece este accesorio.



## **ATENCIÓN**

Es importante que lea detenidamente este manual del operador de principio a fin.

Observe la información de seguridad para evitar daños o lesiones.


También es importante leer y observar el manual del operador y el manual de seguridad del audífono que usted utilice con este accesorio.

## Su transmisor CROS

Las soluciones CROS se han diseñado para personas con una pérdida de audición profunda en un oído que no se puede mejorar con el uso de un audífono. El transmisor CROS colocado en ese oído captura el sonido de ese lado y lo transmite al audífono del otro oído. Esto permite al usuario del audífono escuchar los sonidos de ambos lados.

**transmisor CROS**

**audífono**

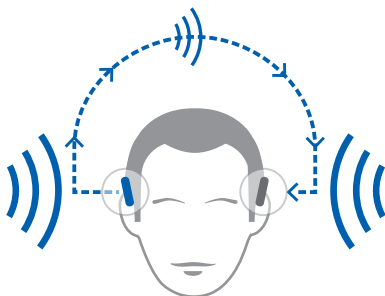

Hay dos soluciones disponibles:

■ Solución CROS:

Para personas con una audición normal en un oído y una pérdida profunda de audición en el oído contrario. Los sonidos procedentes del lado con pérdida de audición se capturan y se transmiten de forma inalámbrica al lado que cuenta con una buena audición.

■ Solución BiCROS:

Para personas con una pérdida profunda de audición en un oído y una pérdida de audición menos grave en el oído contrario. Los sonidos procedentes del lado con una pérdida de audición más grave se capturan y se transmiten de forma inalámbrica al lado que cuenta con una mejor audición. El audífono procesa y amplifica los sonidos de los dos lados.


El transmisor CROS funciona con nuestros audífonos inalámbricos específicos. Su especialista en audición le informará sobre los modelos compatibles.



**AVISO**

Este manual del operador solo es válido para el transmisor CROS. El audífono incluye un manual del operador aparte.

## Componentes y nombres

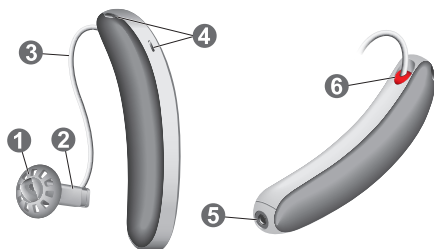

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1 Molde               | 4 Orificios del micrófono  |
| 2 Auricular           | 5 Contacto de carga  |
| 3 Cable del auricular | 6 Indicador de lado<br>(rojo = oído derecho,<br>azul = oído izquierdo) |

Puede utilizar los moldes estándar siguientes:

Moldes estándar	Tamaño
<input type="radio"/>  Sleeve 3.0, Vented, Closed, Power	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Open	
<input type="radio"/>  Eartip 3.0 Tulip	

Los moldes estándar son muy fáciles de sustituir. Obtenga más información en la sección "Mantenimiento y cuidado".

## Controles

El transmisor CROS no tiene controles. Si desea ajustar el volumen o cambiar de programa de audición manualmente, puede solicitar a su especialista en audición la opción de usar un telemando.

## Programas de audición

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Obtenga más información en la sección "Cambio del programa de audición".

## Tonos de aviso

Los tonos de aviso del transmisor CROS, como el pitido indicador de batería baja, se envían al audífono. Pregunte a su especialista en audición para configurar los tonos de aviso.



# Uso diario

## Colocación y extracción del transmisor

Los audífonos se han ajustado para el oído derecho e izquierdo. El color de las marcas indican el lado:


- marca roja = oído derecho
- marca azul = oído izquierdo




Colocación del dispositivo:

- ▶ En el caso de Sleeves, asegúrese de que la curvatura del Sleeve esté alineada con la curva del cable del auricular. Observe estas imágenes.

Correcto:

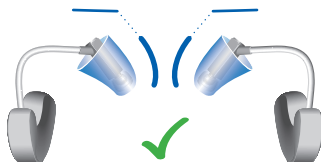

Incorrecto:

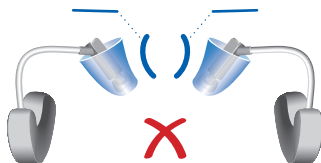


- ▶ Sujete el cable del auricular por la curva más próxima al molde.

- ▶ Introduzca con cuidado el molde en el canal auditivo ①.
- ▶ Gírelo un poco para que se asiente bien.

Abra y cierre la boca para evitar la acumulación de aire en el canal auditivo.

- ▶ Levante el dispositivo y deslícelo por la parte superior del pabellón auditivo ②.

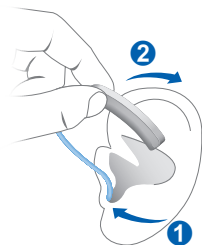


**i**

- Puede resultarle más fácil insertar el dispositivo derecho con la mano derecha y el dispositivo izquierdo con la mano izquierda.
- Si tiene problemas para insertar el molde, tire suavemente del lóbulo de la oreja hacia abajo con la otra mano. Esto abre el canal auditivo y facilita la inserción del molde.

El filamento de sujeción opcional ayuda a retener de forma segura el molde en el oído.


Para colocar el filamento de sujeción de sujeción:

- ▶ Doble el filamento de sujeción y colóquelo con cuidado en la parte inferior de la cavidad de la oreja (consulte la imagen).

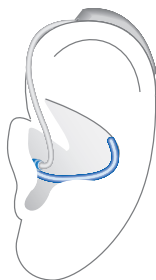

Extracción de un dispositivo:

- ▶ Levante el dispositivo y deslícelo por la parte superior del pabellón auditivo ①.
- ▶ Si su dispositivo dispone de una carcasa personalizada o un molde, extráigalos tirando de la pequeña cuerda de extracción hacia la parte de atrás de la cabeza.
- ▶ Para todos los demás moldes: Sujete el auricular en el canal auditivo con dos dedos y tire de él con cuidado ②.

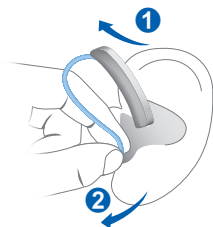

No tire del cable del auricular.

Limpie y seque el dispositivo después de utilizarlo. Puede consultar más información en la sección "Mantenimiento y cuidados".

## Conexión y desconexión

Dispone de las siguientes opciones para conectar y desconectar el dispositivo.

Mediante cargador:

- ▶ **Conexión:** Retire el dispositivo del cargador.  
Se reproduce la melodía de inicio en el audífono.  
Se restablecen el volumen y el programa de audición predeterminados.
- ▶ **Desconexión:** Coloque el dispositivo en el cargador.

Para obtener más información, consulte el manual del operador del cargador.



Tenga en cuenta que el cargador debe estar encendido.

## Cambio al modo de reposo

Puede poner el dispositivo en modo de espera (standby) con un telemando o la aplicación para smartphones.

De esta manera, el dispositivo se silencia. Cuando se sale del modo de espera, se recuperan el volumen y el programa de audición utilizados anteriormente.

Nota:

- En el modo de espera, el dispositivo no está apagado por completo. Sigue consumiendo algo de energía.

Por este motivo, se recomienda utilizar el modo de espera solo durante períodos breves.

- Si desea salir del modo de espera, pero no tiene a mano el telemando o la aplicación: Apague y vuelva a encender el dispositivo (colocándolo brevemente en el cargador hasta que se encienda el LED verde). En tal caso, se restablecen el volumen y el programa de audición predeterminados.

## **Cambio del programa de audición**

El dispositivo ajusta automáticamente el sonido según la situación auditiva.

Es posible que el dispositivo también tenga varios programas de audición que le permitan cambiar el sonido, si es necesario. Un tono de aviso opcional puede indicar el cambio de programa.

- ▶ Para cambiar de programa de audición y ver una lista de los programas de audición, consulte la sección "Programas de audición".

Se ha aplicado el volumen predeterminado.

## **Bluetooth**

Su dispositivo incluye Bluetooth®\* tecnología inalámbrica.

En un avión, es posible que se restrinja el uso de la función Bluetooth, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. En ese caso, puede desactivar la tecnología inalámbrica Bluetooth en su dispositivo a través de la aplicación para smartphones.

\* Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Miracle-Ear se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

## Carga

Para su transmisor CROS, puede elegir entre MECHARGE™ iRIC AX Charger **1** o MECHARGE™ Dry & Charge Charger **2**.



- ▶ Para cargar el transmisor, colóquelo en el cargador.
- ▶ Siga las instrucciones del manual del operador del cargador. En el manual del operador del cargador también encontrará consejos útiles para la carga.

## Indicación de nivel bajo de batería

Su audífono emitirá un tono de aviso para indicar que la pila recargable de iones de litio del transmisor se está agotando. El tono se repetirá cada 20 minutos. Según el nivel de uso de los audífonos, tiene aproximadamente 1,5 horas para cargar los audífonos antes de que dejen de funcionar.

Tenga en cuenta que el tiempo de ejecución de la batería se reduce si se utilizan demasiadas funciones al mismo tiempo.

# Mantenimiento y cuidados

Para evitar daños, es importante que cuide el dispositivo y siga algunas normas básicas que pronto se convertirán en parte de su rutina diaria.

## Transmisor

### Limpieza

Su dispositivo tiene un revestimiento protector. No obstante, si no se limpia regularmente, pueden producirse daños en el dispositivo o lesiones personales.

- ▶ Limpie el dispositivo a diario con un paño suave y seco.
- ▶ No utilice nunca agua corriente ni sumerja el dispositivo en agua.
- ▶ No aplique nunca presión durante la limpieza.
- ▶ No utilice disolvente alcohólico sobre el contacto de carga.
- ▶ Para evitar la corrosión, use un paño suave y seco para limpiar el sudor o cualquier líquido de los contactos de carga o del audífono antes de colocarlo en el cargador.
- ▶ Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de limpieza recomendados y los kits de mantenimiento, o pídale más información sobre cómo mantener el dispositivo en buen estado.





## Secado

Para secar el dispositivo, puede utilizar productos convencionales o el MECHARGE™ Dry & Charge Charger opcional. Pregunte a su especialista en audición sobre los productos de secado recomendados y sobre instrucciones específicas acerca de cuándo secar el dispositivo.

## Almacenamiento

- Almacenamiento a corto plazo (varios días):

Apague el dispositivo. Para ello, colóquelo en el cargador encendido.

El cargador debe estar conectado. Si el cargador no está conectado y usted coloca el dispositivo en el cargador, este no se apagará. Tenga en cuenta que si apaga el transmisor CROS con un telemando o la aplicación para smartphones, el dispositivo no se apaga por completo. Entra en modo de espera y sigue consumiendo algo de energía.

- Almacenamiento a largo plazo (semanas, meses, etc.):

En primer lugar, cargue del todo el transmisor CROS. Déjelo en el MECHARGE™ iRIC AX Charger con la tapa cerrada. Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, el cargador y el transmisor CROS se apagan automáticamente.

Se recomienda usar productos de secado al almacenar el dispositivo.

Deberá cargar el dispositivo cada seis meses a fin de evitar una descarga completa irrecuperable de la pila recargable de iones de litio. Las baterías que se han descargado completamente no pueden volver a cargarse y deben sustituirse. Se recomienda recargar con más frecuencia que a intervalos de seis meses.

Respete las condiciones de almacenamiento de la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".


## Moldes

### Limpieza

Puede acumularse cerumen (cera del oído) en los moldes. Esto puede afectar a la calidad del sonido. Limpie los moldes a diario.

Para todos los tipos de moldes:


- ▶ Limpie el molde con un paño suave y seco justo después de extraerlo. De este modo se evita que el cerumen se seque y se endurezca.

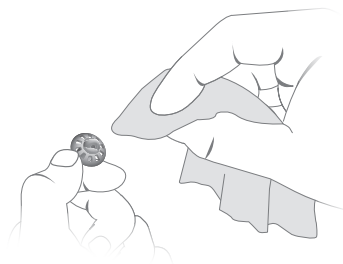


## Sustitución

Sustituya los moldes estándar aproximadamente cada tres meses. Sustitúyalos más pronto si observa grietas u otros cambios. El procedimiento para sustituir los moldes estándar depende del tipo de molde. En la sección "Componentes y nombres", su especialista en audición ha marcado el tipo de molde.

- ▶ Para retirar el antiguo Eartip o Sleeve, siga las instrucciones que se ilustran a continuación. Tenga cuidado de no tirar del cable del auricular.

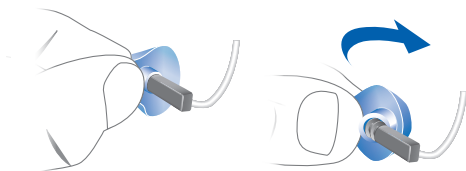

- ▶ Asegúrese especialmente de que el nuevo Eartip o Sleeve cubra por completo los anillos de sujeción del auricular.
- ▶ Compruebe que el nuevo Eartip o Sleeve encaje firmemente.

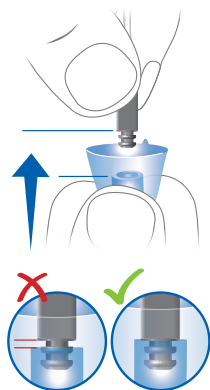

### **Mantenimiento profesional**

El especialista en audición puede realizar una limpieza y un mantenimiento exhaustivos y profesionales.

Los moldes a medida y los filtros de cera deben sustituirse según sea necesario por un especialista en audición.

Solicite a su especialista en audición una recomendación personalizada de los intervalos de mantenimiento y asistencia.

# Información adicional

## Accesorios

smartphone app se puede utilizar para manejar cómodamente el dispositivo. La aplicación también permite desactivar determinados tonos de señal, crear perfiles

de sonido individualizados y muchas otras funciones.

Si desea obtener más información, consulte a su especialista en audición.

## Explicación de los símbolos

### Símbolos utilizados en nuestras guías de usuario

---



Indica una situación que podría provocar lesiones leves, moderadas o graves.



Indica posibles daños materiales.



Consejos y sugerencias para manejar mejor el dispositivo.



Pregunta frecuente.



Indica el fabricante legal del dispositivo.

---

### Otros símbolos en el dispositivo o el embalaje

---



No deseche el dispositivo con la basura doméstica general. Obtenga más información en la sección "Información sobre la eliminación".

---

## Otros símbolos en el dispositivo o el embalaje

---



El embalaje se puede reciclar.

---



Lea y siga las instrucciones de la guía de usuario.

---



Manténgase seco durante el transporte.

---



Temperatura durante el transporte. Obtenga más información en la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".

---



Humedad relativa durante el transporte. Obtenga más información en la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".

---



Presión atmosférica durante el transporte. Obtenga más información en la sección "Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento".

---



Dispositivo médico.

---

## Condiciones de funcionamiento, transporte y almacenamiento

El dispositivo funciona en las siguientes condiciones ambientales (válidas también entre usos):

Condiciones de funcionamiento	Descarga	Carga
Temperatura	0-50 °C 32-122 °F	10-35 °C 50-95 °F
Humedad relativa	5-93 %	5-93 %
Presión atmosférica	700-1060 hPa	700- 1060 hPa

En el caso de largos periodos de transporte y almacenamiento, tenga en cuenta las siguientes condiciones:

	Almacenamiento	Transporte
Temperatura (recomendada)	10-25 °C 50-77 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Temperatura (rango máximo)	10-40 °C 50-104 °F	-20-60 °C -4-140 °F
Humedad relativa (recomendada)	20-80 %	5-90 %
Humedad relativa (rango máximo)	10-80 %	5-90 %
Presión atmosférica	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Tenga en cuenta que es necesario cargar el dispositivo cada seis meses como mínimo. Recomendamos cargar el dispositivo cada tres meses. Para más información, consulte la sección "Mantenimiento y cuidados".

Para otras piezas, como el cargador, pueden aplicarse otras condiciones.



### **AVISO**

Cuando no los esté usando, guarde los audífonos en la caja o el estuche de carga suministrado (según corresponda) y manténgalos fuera del alcance de los niños.



### **ADVERTENCIA**

Riesgo de lesiones, incendio o explosión durante el transporte.

- ▶ Transporte las baterías de litio y los audífonos según la normativa local.

### **Información sobre la eliminación**

- ▶ Para evitar la contaminación medioambiental, no tire las baterías ni los dispositivos en la basura doméstica.
- ▶ Recicle o elimine el embalaje, las baterías y los dispositivos según la normativa local.



## Solución de problemas

### Problema y posibles soluciones

---

El audífono emite tonos de aviso.

---

- Cargue el dispositivo.
  - Consulte el manual del operador de su audífono.
- 

El dispositivo no funciona.

---

- Encienda el dispositivo.
  - Cargue el dispositivo. Observe también los LED de estado del cargador.
- 

En caso de otros problemas, consulte al especialista en audición.

## **Información de conformidad**

Los dispositivos con la marca FCC cumplen los estándares de la FCC relativos a las interferencias electromagnéticas.

Este aparato digital de Clase B cumple con ICES-003 de Canadá.

Este dispositivo cumple con el párrafo 15 de las normas FCC y con los RSS con exención de licencia de ISED.

Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y
- este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y respeta los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el párrafo 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza cumpliendo las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse conectando y desconectando el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia con una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito diferente al del receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio y TV.

Aviso de precaución de la FCC: Los cambios o las modificaciones que no hayan sido autorizados expresamente por la parte responsable de la conformidad pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

## **Información específica por país**

### **EE. UU. y Canadá**

Información de certificación para los dispositivos con funcionalidad inalámbrica:

MEENERGY™ CROS iRIC AX

- HVIN: RFM004
- Incluye ID FCC: 2AXDT-RFM004
- Incluye ID CI: 26428-RFM004

# Información importante de seguridad

## Pila recargable de iones de litio (batería)



### ADVERTENCIA

El audífono contiene una pila recargable de ion de litio integrada de forma fija. Un uso incorrecto del audífono puede hacer que la pila recargable de ion de litio reviente.

Riesgo de lesiones, incendio o explosión

- ▶ Siga las instrucciones de seguridad para la pila recargable de ion de litio incluidas en esta sección.



### ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

- ▶ Conecte el cargador únicamente a una fuente de alimentación USB que cumpla IEC 60950-1 o IEC 62368-1.



## ADVERTENCIA

Respete las condiciones de funcionamiento.

- ▶ Extreme las precauciones para proteger el audífono del calor extremo (p. ej., fuego, horno microondas, horno de inducción y otros campos de alta inducción) y de la luz solar.
- ▶ Cargue los audífonos únicamente con un cargador autorizado. Solicite asistencia a su especialista en audición.
- ▶ No desmonte el dispositivo.
- ▶ No utilice el dispositivo en atmósferas explosivas.
- ▶ No utilice dispositivos que estén deformados o claramente dañados.
- ▶ No utilice el dispositivo si su rendimiento se reduce considerablemente después de la carga. Lleve el dispositivo a su especialista en audición.
- ▶ No tire el dispositivo al fuego o al agua.



## ADVERTENCIA

Las tareas de sustitución y reparación debe realizarlas un profesional. Por lo tanto:

- ▶ No repare ni sustituya la pila recargable de ion de litio usted mismo.
- ▶ En el caso improbable de que reviente o explote una pila recargable de ion de litio, aléjela de cualquier material combustible.

En cualquiera de los casos anteriores, devuelva el dispositivo a su especialista en audición.

## Seguridad personal



### ADVERTENCIA

Riesgo de afectar a los equipos electrónicos.

- ▶ Si se encuentra en zonas donde el uso de dispositivos electrónicos o inalámbricos está restringido, compruebe si debe apagar el audífono.



### ADVERTENCIA

Peligro de lesiones.

- ▶ Si el aparato está claramente dañado, no lo use y devuélvalo al punto de venta.



### ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que cualquier cambio no autorizado en el producto puede provocar daños materiales o personales.

- ▶ Utilice solo piezas y accesorios autorizados. Solicite la asistencia de su especialista en audición.



### **ADVERTENCIA**

Peligro de asfixia.

El dispositivo contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.

- ▶ Mantenga los audífonos, pilas y accesorios fuera del alcance de los niños y personas con deficiencias mentales.
- ▶ En caso de ingestión de alguna pieza, consulte con un médico o acuda a un hospital inmediatamente.



### **ADVERTENCIA**

En caso de ingerir una pila, llame al servicio de información toxicológica: 13 11 26 en Australia, y 0800 764 766 en Nueva Zelanda. En otros países, llame al servicio nacional de información toxicológica.



### **ADVERTENCIA**

Su dispositivo puede reducir algunos sonidos de fondo, lo cual puede incluir señales de tráfico o de advertencia.



### **ADVERTENCIA**

¡Peligro de explosión!

- ▶ No use el dispositivo en atmósferas explosivas (p. ej. en minas).



## Contraindicaciones



### ADVERTENCIA

Consulte con un especialista en audición si experimenta efectos secundarios poco habituales, como irritación en la piel, acumulación excesiva de cera, mareo o cambios en la capacidad auditiva, o si cree que puede tener algún objeto extraño en el canal auditivo.



### ADVERTENCIA

En caso de alergia de contacto conocida, consulte al fabricante del audífono acerca de la posible presencia del alérgeno antes de utilizarlo.

Si se presenta una reacción alérgica tras el uso del audífono, interrumpa inmediatamente su utilización y consulte con un médico acreditado.



## **ADVERTENCIA**

El especialista en audición debe recomendar al usuario potencial del dispositivo que consulte con un médico antes de utilizarlo, en caso de que determine que dicho usuario padece uno de los siguientes trastornos:

- ▶ Deformidad congénita o traumática visible de la oreja.
- ▶ Historial de secreción constante del oído en los últimos 90 días.
- ▶ Historial de pérdida auditiva repentina o de progresión muy rápida en los últimos 90 días.
- ▶ Mareo agudo o crónico
- ▶ Pérdida auditiva unilateral repentina o reciente en los últimos 90 días.
- ▶ Intervalo aéreo-óseo de audiometría igual o superior a 15 dB a 500 Hz, 1000 Hz y 2000 Hz.
- ▶ Evidencia visible de acumulación significativa de cerumen o de presencia de un cuerpo extraño en el canal auditivo.
- ▶ Dolor o molestias en el oído.

## **Seguridad del producto**



### **AVISO**

- ▶ Proteja los dispositivos del calor extremo. No los exponga a la luz directa del sol.



### **AVISO**

- ▶ No seque los dispositivos en un horno microondas.



## AVISO

Distintos tipos de radiaciones intensas, p. ej. las que se aplican durante los exámenes de rayos X o MRI de la cabeza, pueden dañar los dispositivos.

- ▶ No use los dispositivos durante estos o similares procedimientos.

Las radiaciones más débiles, p. ej. las que emiten los equipos de radio o de seguridad del aeropuerto, no dañan los dispositivos.



## AVISO

- ▶ Proteja los dispositivos de la humedad elevada. No los lleve en la ducha ni al aplicarse maquillaje, perfume, loción para después del afeitado, laca para el cabello ni lociones bronceadoras.



En algunos países existen restricciones al uso de equipos inalámbricos.

- ▶ Para más información, consulte a las autoridades locales.



## AVISO

Sus dispositivos están diseñados para cumplir los estándares internacionales en materia de compatibilidad electromagnética, pero pueden producirse interferencias con los dispositivos electrónicos cercanos. En este caso, apártese de la fuente de interferencias.

## Servicio y garantía

### Números de serie

---

Izquierda:

---

Derecha:

---

### Fechas de servicio

---

1:

---

4:

---

2:

---

5:

---

3:

---

6:

---

### Garantía

---

Fecha de compra:

---

Período de garantía (meses):

---

### Su especialista en audición

---

---



**Your Miracle-Ear® Representative:  
Su representante de Miracle-Ear®:**



Distributed By Miracle-Ear, Inc.  
150 South Fifth Street, Suite 2300  
Minneapolis, MN 55402  
[www.miracle-ear.com](http://www.miracle-ear.com)

Information in this manual subject to change without notice.  
Copyright ©2022 Miracle-Ear, Inc.  
La información de este manual está sujeta a cambio sin previo aviso.  
Derechos de autor ©2022 Miracle-Ear, Inc.

Hearing aid made in Singapore  
Hearing aido de audición hecho en Singapur